



## 設置手順

1. 上図のように各ケーブルを12号機のコネクタに接続する。
2. 12号機の電源を立ち上げると「伝の心」が自動で立ち上がるが、「終了しますか」とメッセージが出るので「Enter」を押してWin画面にする。
3. 「Herty・・・」のpdf説明書をしっかりと読み、理解する。
4. 説明書に従って「」、2種の「環境設定」でチェックする。
5. 「HertyAi」を立ち上げるとtobiiEyeXの赤ランプが点灯し、画面に視線カーソルが表示され、目の動きに合わせてカーソルが動くことを確認する。
6. ハーティラダーを立ち上げると使用状態になる。