



こころかさね クイックスタートガイド



1 内容物の確認

次のものが入っているかお確かめください。



こころかさね

- ・クイックスタートガイド（本紙）



- ・安全上のご注意

- ・ソフトウェア
使用許諾契約書

- ・こころかさね
保証書


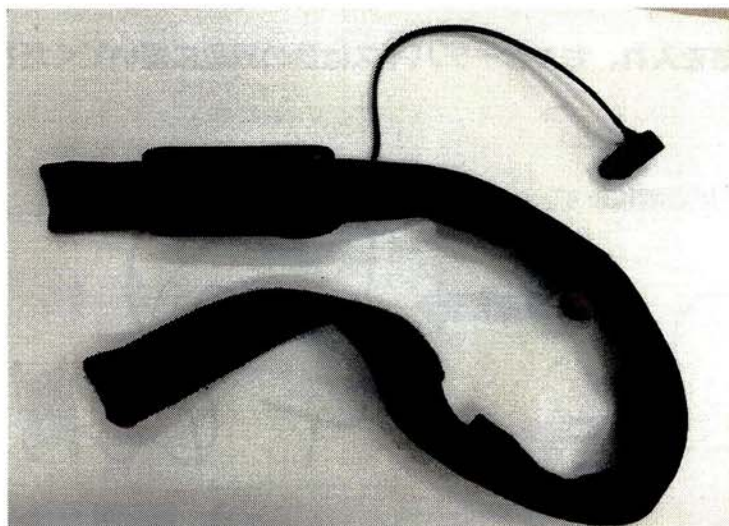
タブレット関連

- ・こころかさね専用タブレット

- ・マイクロUSBケーブル・ACアダプタ


デバイス関連


- ・こころかさね専用デバイス

- ・ヘッドバンド

- ・単4乾電池1本


センサーデバイス は下記の構成になっていることを確認してください。

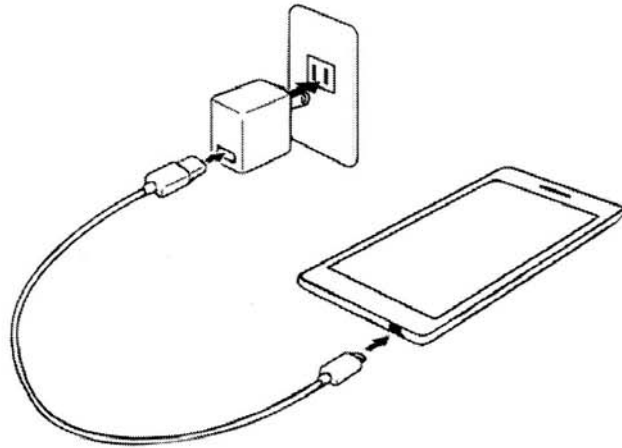


2 使い方

(1) タブレットを充電します。




(2) タブレットを起動します。

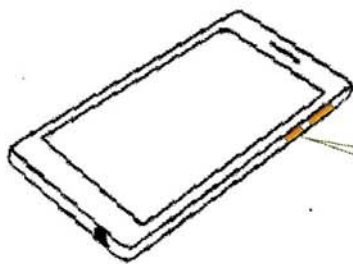


小さい方のボタンを長押しします。

(3) タブレットの画面に表示されているころかさねアプリのアイコンをタップします。
ころかさねアプリの初期設定が始まります。(4) 以降の操作をお願いします。

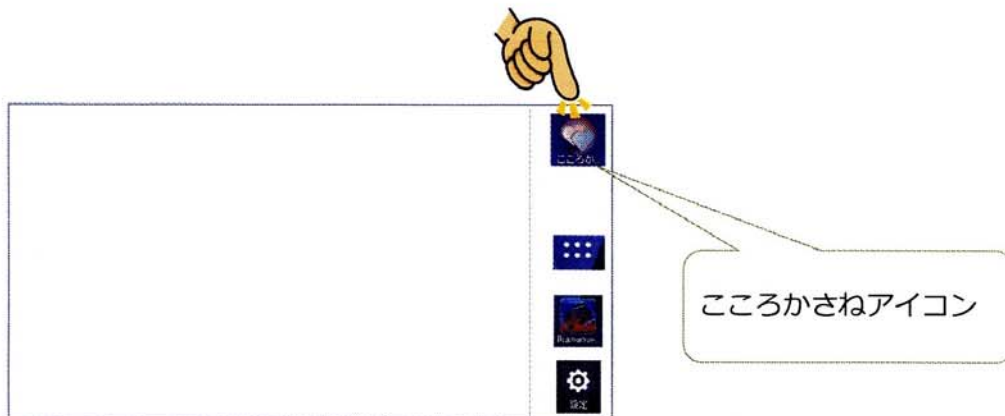


④ センサーデバイスの電源を入れ、頭部に装着します。



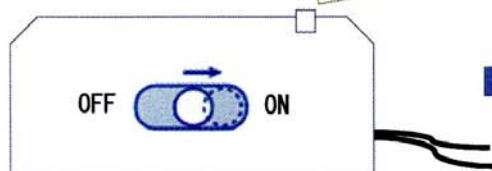

電源が入るとLEDランプが点滅します。

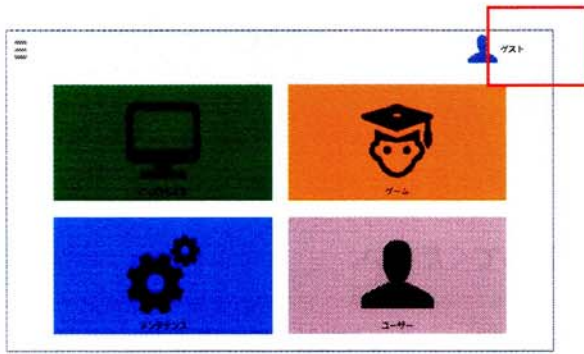

(9) 右上のバーを見て正常に接続出来ていることを確認します。





センサーデバイスとタブレットの接続
状況を示しています。

-  正常に生体信号を受信できている状態
-  生体信号の受信状態が少し悪い状態
-  生体信号の受信状態が非常に悪い状態
-  接続できていない状態

※正常に接続できない場合は、8ページ
をご参照ください。

(10) 「こころもよう」をタップして「もとの波形」が表示されていることを確認します。

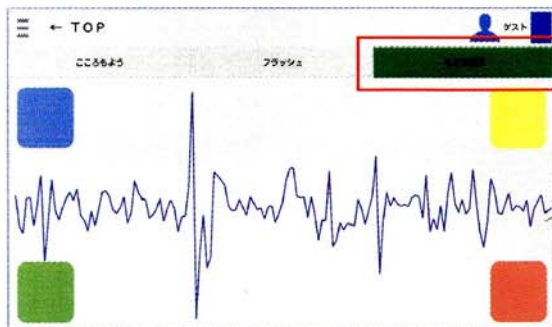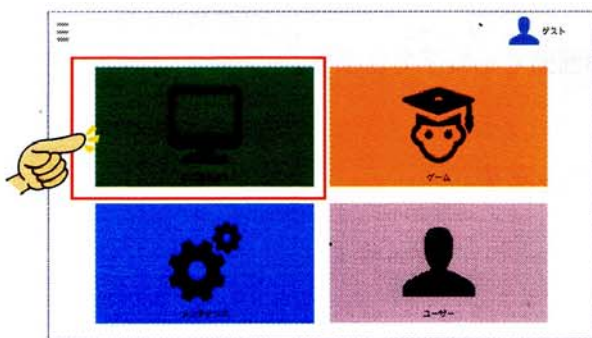

生体信号を正常に受信できていると、
波形が表示されます。

これでこころかさねのセットアップは完了です。

こころかさねを使ってみましょう！

【正常に接続できない場合】

正常に生体信号を受信できない場合は、下記の方法で解消できる可能性があります。

  の状態の場合

センサーデバイスの装着状態が良くありません。

- ・イヤークリップの位置を調整してください。
- ・額電極と額の上に髪の毛が挟まっていないか確認してください。
- ・額電極と額が接する位置を調整してください。
- ・額電極に接する額と耳の部分を酒精綿やアルコールティッシュで拭いてください。
- ・使用者が静電気を帯びている可能性があります。静電気除去を行ってください。

 の状態の場合


センサーデバイスとタブレットが接続できていません。

- ・センサーデバイスの電源が入っているか確認してください。
- ・タブレットを再起動してください。
- ・こころかさねアプリ内のメニューからマニュアルを開き、ペアリングの設定を確認してください。


3 終了方法

「こころかさね」には、終了ボタンはありません。どの画面でも終了できます。

(1) センサーデバイスを取り外し、電源をOFFにします。

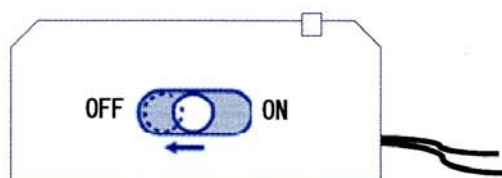

(2) タブレットの電源を切ります。

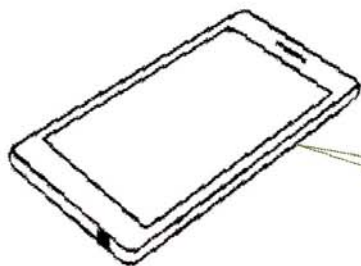

小さい方のボタンを長押しします。