

マクトス (MCTOS model V/X)

操作手順

1. バンド型ディテクタ (SENSOR) を被検者のひたいに装着する。
2. MCTOS 本体に電池が装着されていることを確認する。
3. MCTOS 本体のスイッチ (POW の SW) を ON にし、画面を出す。
4. ↓キーを押して LEV-PG を選択する。
5. ◎キーを押して確定する。
6. LEV80、SE10 の設定から調整してみる。
7. こめかみ、眼球などの筋電位で「ピッ」と反応が出ます。

注) 環境に電子機器があるとそのノイズの影響が出る場合があります。

