


こころかさね13号機の構成図

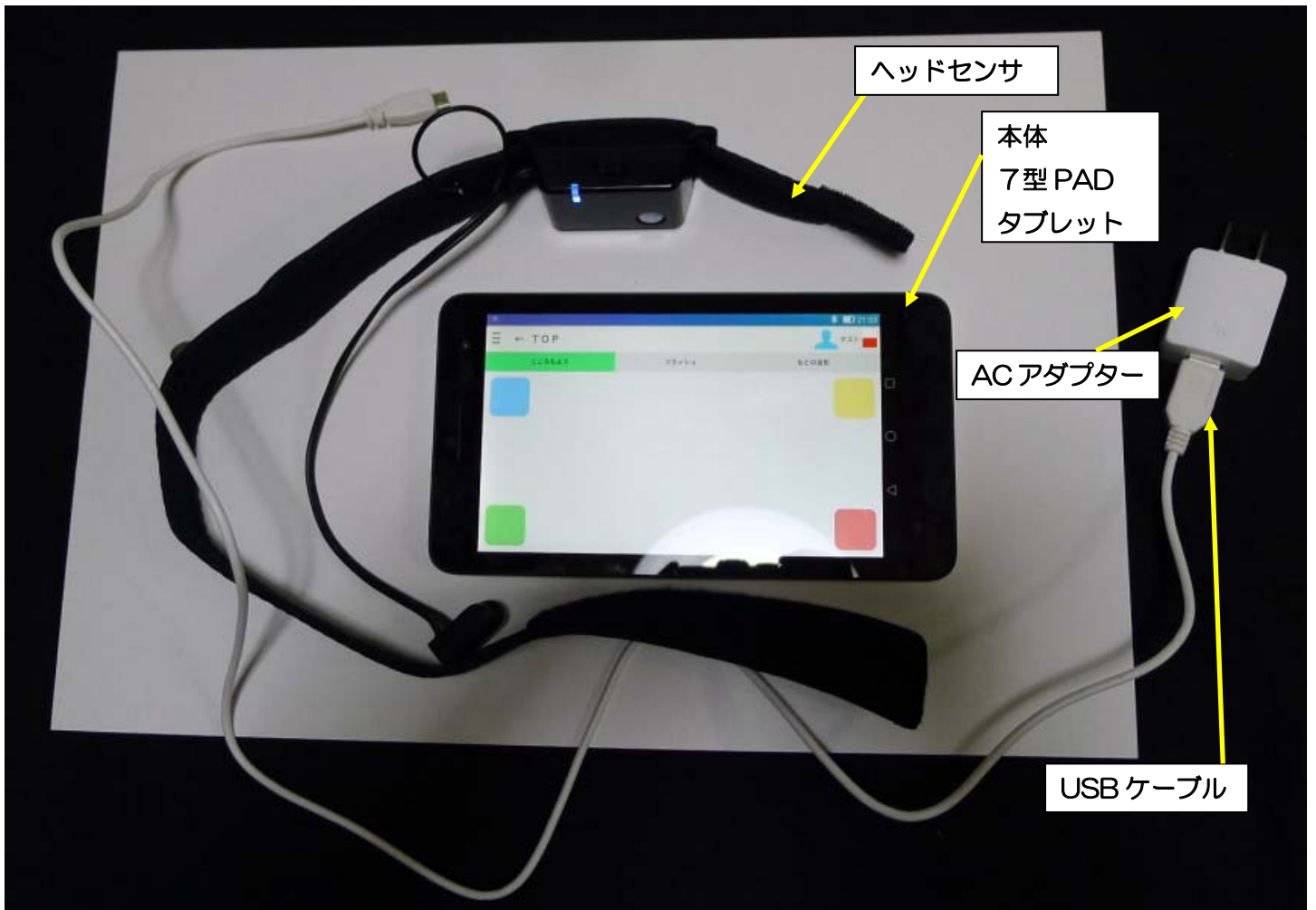

操作手順

1. 本体の電源を起動（電源ボタンを長押しする）
2. ヘッドセンサの電源を起動（青ランプが点滅する）
3. 本体画面を下から上にスライドさせメニューを表示させる
4. 「こころもよう」のアイコン画面をタッチして本体画面を表示する
5. ヘッドセンサを額にセット（耳タブのクリップも付ける）する。
右上の赤印バー→青印に変化し、画面の中央に円パターンが現れば、使用準備は完了
6. 終了は、ヘッドセンサのスイッチをOFFし、本体の電源ボタンを長押しする

トラブル対策

1. 右上のバーが青にならない→ヘッドセンサがきちんとセットされていない
あるいは、ヘッドセンサの電池（単4が1ケ）が切れている→交換
2. その他 ヘッドセンサの電極はしっかりと額の皮膚に密着しているかどうか、耳タブのクリップ接続がしっかりとされているかの確認。